

Provinovx



Das innovative Patientenüberwachungssystem

Der Körperdruckmelder PROVINOXX wurde speziell für die Anwendung in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, psychiatrischen Einrichtungen, im Rahmen des betreuten Wohnens und für den Einsatz im privaten Zuhause entwickelt.

Die Pflege und Betreuung von dementen und sturzgefährdeten Personen stellt für das Pflegepersonal eine spezielle Herausforderung dar.

PROVINOXX hilft mit, diesen Aufwand beträchtlich zu minimieren. Mit PROVINOXX hat das Betreuungspersonal die Sicherheit, sofort informiert zu werden, wenn die zu betreuende Person das Bett zu verlassen versucht.

Die Vorteile in Kürze

- Frühzeitige Meldung an das Pflegepersonal
- Meldung bevor der Bewohner / Patient die Füße auf dem Boden hat
- Kein unbeabsichtigtes Rufauslösen durch Besucher, das Reinigungs- oder Pflegepersonal
- Keine Stolperfalle
- Kein „schwarzes Loch“ vor dem Bett
- Einfachste Installation
- Wartungsfrei
- Lange Nutzungsdauer
- Schweizer Qualität

Nutzen für Betreuungspersonal und Bewohner / Patient

Während herkömmliche Systeme erst informieren, wenn der Bewohner / Patient das Bett schon verlassen hat, informiert Sie PROVINOXX weitaus früher. Das Sturzrisiko vermindert sich erheblich. Mit PROVINOXX hat das Pflegepersonal die Gewissheit, rechtzeitig informiert zu werden, wenn ein Bewohner / Patient das Bett verlassen möchte. Dies macht nächtliche Kontrollgänge unnötig und gibt dem Personal Zeit, andere Aufgaben zu erledigen.


PROVINOXX ist ein Schweizer Produkt und wird in der Schweiz hergestellt. Die hohe Qualität von Material und Verarbeitung garantieren für eine lange Nutzungsdauer und Wartungsfreiheit.

Einfachste Installation

PROVINOXX wird an der Bettkante, unter die Matratze geschoben. Das Druckelement soll sich an der Stelle befinden, an der der Bewohner / Patient das Bett verlässt.

Über das Kabel an der einen Seite, wird das Gerät mit der Schwesternrufanlage verbunden. An der Buchse kann ein herkömmlicher Birntaster eingesteckt werden.

Mit dem Inkontinenzschutz wird die Einrichtung vor Nässe geschützt. Abschliessend wird das Spannleintuch über die Matratze und PROVINOXX gezogen. So ist PROVINOXX einsatzbereit und unsichtbar.

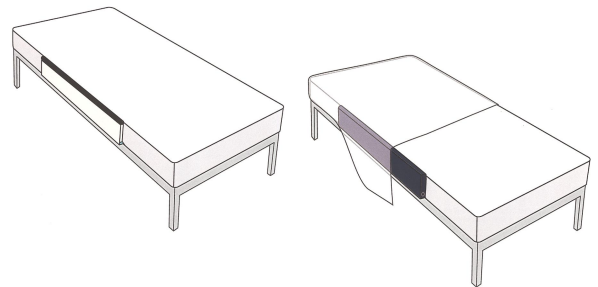

Wird PROVINOXX ohne Schwesternrufanlage verwendet, so wird anstelle des Schwesternrufsystems, das Funkelement am Kabel angeschlossen, während der Funkempfänger (Glocke) einfach in eine Steckdose gesteckt werden kann (Funkreichweite beachten).

Sobald nun der Bewohner / Patient das Bett verlassen möchte, wird dies über die Schwesternrufanlage oder die Funk-Glocke signalisiert.

Technische Daten

Typ / Artikelnummer	100 014		
Masse in mm (ca.):			
- Boden	800 x 250 x 13	Pflege:	Gebräuchliche Reinigungsmittel max. 70 Vol% Alk.
- Front	800 x 115 x 30	Inkontinenzschutz:	Waschbar - 95°C, kein Tumbler
Installation:	Unter Matratze	Elektrische Belastbarkeit:	24 Volt
Gewicht:	3,5 kg	Auslösegewicht:	7,0 kg
Schaltkontakt:	1 NO / 1 NC		

Vertrieb / Bestellungen

Vertrieb international:

signakom
Dorfstrasse 34
5412 Gebenstorf
Schweiz

Tel.: 0041 (0)56 221 01 01
E-mail: info@signakom.ch
www.provinox.com
www.signakom.ch

Überreicht durch:



© Copyright 2008 by signakom Schweiz
PROVINOXX Patent angemeldet.
Hinweis: PROVINOXX dient zur Unterstützung des
Pflegepersonals. Weder der Produzent noch die am Vertrieb
beteiligten Personen und Firmen können für allfällige
Schäden im Zusammenhang mit PROVINOXX an Personen
oder Gegenständen haftbar gemacht werden. Änderungen
infolge technischer Entwicklung behalten wir uns vor.